

Suma[®] Med Rinse Plus

Surt tork- och blötlägningsmedel för instrumentdisk

Produktbeskrivning

Suma Med Rinse Plus är ett kombinerat tork- och blötlägningsmedel för instrumentdisk.

Produktegenskaper

Suma Med Rinse Plus är ett surt tork- och blötlägningsmedel för instrumentdisk. Formulan passar alla typer av disk. Produkten är uppbyggd av en unik blandning av nonjontensider och citronsyra för att ge snabb och fläckfri torkning utan ränder. Suma Med Rinse Plus passar även utmärkt som blötlägningsmedel för instrument med blod, rost och annan smuts.

Produkten innehåller effektiv skumdämpare och motverkar effektivt kalkbildning. Passar alla vattenhårdheter.

Produktfördelar

- Unik kombinerad formula för både torkning och blötläggning
- Ger snabb torkning av diskgodset
- Fläckfritt diskresultat utan ränder
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Effektiv skumdämpning

Bruksanvisning

Suma Med Rinse Plus doseras vanligen manuellt i diskmaskinens doseringsfack 0.2-0.4 ml/L.

Vid Blötläggning dosera 1-2 liter Suma Med Rinse Plus till 10 liter varmt vatten (temperatur 40-60 °C) Låt sedan verka i 10 minuter.

Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden.

Teknisk information

Utseende:	Klar vätska
pH koncentrat:	2.0
Densitet (20 °C):	1.08

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

För fullständig information om hantering och förvaring hänvisas till säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning. Undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Om produkten används enligt bruksanvisning kan Suma Med Rinse Plus användas på dom flesta vanligen förekommande material inom sjukvården.

OBS! Använd inte koncentrerad produkt direkt på koppar, mässing och aluminium. Undvik doseringsnipplar av koppar i diskmaskinen.

Förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek
6 x 1 L
2 x 5 L
10 L
200 L

www.sealedair.com

