

Anvisning för kanylburkar, Dispo-serien

1

Placera burken på ett stabilt och plant underlag. Öppna den lilla öppningen innan du lägger på locket. **Placera locket i samma läge som på bilden.**



2

Montera locket på burken genom att trycka hårt runt kanterna. **Kontrollera att locket sitter fast.** Burken är nu klar att använda.



3

Respektera den maximala fyllnadsnivån som finns markerad på burkens framsida.



4

Temporär förslutning: Fäll ner locket med hjälp av den lilla plastfliken. Tryck på fliken tills den snäpper fast i kanten. Burken är nu temporärt försluten och kan öppnas igen.



5a

Permanent förslutning: Tryck hårt med två fingrar på framkantens markering "Push".



5b

På de större modellerna, tryck även hårt på båda sidornas markeringar "Push".



Samtliga kanylburkar från San Sac är godkända för ADR-transport av smittförande ämnen, UN 3291. Produkterna uppfyller även kraven i NFX30-500 och BS7320:1990 avseende täthet och punktionssäkerhet.

