

Anvisning för kanylburkar, CS-serien

1

Placera burken på ett stabilt och plant underlag. Lägga på locket.



2

Tryck ner hörnen tills du hör klickljuden.



3

Tryck även ner långsidorna.



4

Avlägsna kanyler eller lägg i annat avfall. Respektera den maximala fyllnadsnivån som finns markerad på burken.



5



Vridlocket har två förslutningslägen:
Första klicket = temporär stängning
Andra klicket = permanent låsning.



CS-serien innehåller kanylburkar i 6 olika utföranden med volym 2-6 liter.



Samtliga kanylburkar från San Sac är godkända för ADR-transport av smittförande ämnen, UN 3291. Produkterna uppfyller även kraven i NFX30-500 och BS7320:1990 avseende täthet och punktionsbeständighet.

