

SEKUMATIC® FR



- ▲ Högeffektiv rengöring
- ▲ Färdig lösning har pH > 10 vid 55 °C
- ▲ Parfym- och skumfri (innehåller inga tensider)
- ▲ CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
- ▲ Uppfyller standarden för diskdesinfektorer, ISO 15883

Alkaliskt maskindiskmedel för spol/diskdesinfektorer

- ▲ Sekumatic® FR är ett flytande alkaliskt maskindiskmedel för medicinska och dentala instrument med utmärkt rengöring av typisk nedsmutsning som t ex blod, protein och serum.

Produkten är formulerad för att kombinera effektiv smutslösning med hög material-kompatibilitet samt skonsamhet mot diskgodset. Dock är produkten inte kompatibel med färgat aluminium.

- ▲ **Bruksanvisning:** Det främsta användningsområdet utgörs av medicinska instrument som tål termisk desinficering. Sekumatic® FR kan även användas för rengöring av termolabila medicinska material vid 45° - 60° C. **Endast för professionell användning.**

Mätning av pH-värde under rengöringen skall göras med en temperaturkompenserande pH-mätare. Den färdiga brukslösningen har pH > 10 vid 55° C

Beroende på vattnets kvalitet rekommenderas en dosering på ca 3–5 ml/L (0,3-0,5%) genom maskinens alkaliresistenta doseringspump. Sekumatic® FR förhindrar kalkbeläggningar i maskin, munstycke och rörledningar. För neutralisation efter rengöring med ett alkaliskt medel rekommenderas en dosering på ca 1-3 ml/L av Sekumatic® FNZ

- ▲ **Teknisk information:** Kemisk sammansättning: Kaliumhydroxid (tensidfri), pH-värde koncentrat: 14,0, pH-värde i brukslösning (20 °C) ~ 11,5, Densitet: 1,35 g/ml.
- ▲ **Förpackningar:**

Art. Nr: 3023670	3x5L
Art. Nr: 3023490	1x200L