

SEKUMATIC® FKS



- ▲ Surt torkmedel för rengöring och desinfektion av bäcken och urinflaskor, etc
- ▲ Fläckfri torkning av bäcken, behållare, vagnar och sängar
- ▲ CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC
- ▲ Uppfyller standarden för diskdesinfektorer, ISO 15883

Surt torkmedel för reducering av torktiden i disk- och spoldesinfektorer

- ▲ Sekumatic® FKS är ett flytande surt tork- och sköljmedel som reducerar torktiden. Det låga pH-värdet ger fläckfri torkning och förhindrar kalkbeläggningar efter alkalisk rengöring.

Produkten är formulerad med korrisionsinhibitorer för skydd av metallinstrument och maskiner.

- ▲ **Bruksanvisning:** Sekumatic® FKS formulering används främst för att underlätta torkningen av bäcken och urinflaskor men kan även användas till annan medicinteknisk utrustning i rostfritt stål som t ex behållare, vagnar och sängar. Då produkten har ett surt pH-värde bör den ej användas till föremål av plast och elastomerer (t ex gummi).
Endast för professionell användning.

För att underlätta torkningen av kirurgiska instrument samt annan medicinsk utrustning rekommenderas en dosering på 0,3-1 ml/L i den slutgiltiga sköljfasen.

- ▲ **Teknisk information:** Kemisk sammansättning: Icke-joniska tensider, komplexbildare & citronsyra, pH-värde koncentrat: 2,0, pH-värde i brukslösning (20 °C) ~ 5,0, Densitet: 1,01 g/ml.
- ▲ **Förpackningar:** Art. Nr: 3088170 1x4.5L