

plum

Plum Ögonskölj

Plum Ögonskölj innehåller 0,9 % steril natriumklorid motsvarande det naturliga saltinnehåll som ögat själv producerar. Den isotoniska lösningen är speciellt lämplig till att skölja och rensa ögat vid snabb förstahjälps där t ex damm eller smuts kommit in i ögat. Flaskorna är utrustade med en ergonomisk ögonkopp som säkrar att vätskan träffar ögat med en mjuk och jämn stråle. Tryck lätt på flaskan utan att klämma. Plum DUO flaskorna är utrustade med en speciell ögonkopp, som gör att du kan skölja båda ögonen samtidigt. Ögonsköljsflaskorna är CE-märkta med hänsyn till gällande regler för medicinsk utrustning.

Fördelar

- Hög funktionssäkerhet - flaskorna är framställda enligt EN 15154-4
- Flexibla systemlösningar - små och stora stationer för väggmontering direkt vid arbetsplatsen. Eller mobila lösningar för att ha med sig i varubilen, i verktygs- och första hjälpen väskan eller direkt i bältesväskan
- Brett användningsområde (t ex industri, laboratorier, första hjälpen väskor, mobil användning etc)
- Enkel och snabb användning - kan användas av den olycksdrabbade personen utan assistans
- Lång hållbarhet - öppnad är den sterila vätskan hållbar i 3 år
- Kräver inget underhåll eller byte av vätska (som vid vanligt vatten)

Innehåll:

- Aqua, Natriumklorid
- pH-värde (koncentrerad) 5-7

Material:

- PE-plast
- Mått hållare: 7,4 x 5,5 x 3,5 cm



Så här sköljer du:



Ta ut flaskan vågrätt ur hållaren



Vrid ögonkoppen tills förseglingen bryts



Luta huvudet bakåt och skölj



Luta dig eventuellt framåt och skölj om du vill undvika att blöta ner kläderna

Bruksanvisning

Produkten kan endast användas en gång. Bör inte användas efter utgångsdatum (se etikett). Använd inte produkten om flaskans försegling är bruten. Är förseglingen bruten, finns det risk för infektion vid användning! Förvaras i 5-35 grader.

| Produktnamn | Art.nr | Antal st/krt | Antal krt/pall |
|---------------------------|--------|--------------|----------------|
| Plum Ögondusch 200ml | 4691 | 10 | 130 |
| Plum Ögondusch 500 ml | 4604 | 12 | 55 |
| Plum Ögondusch DUO 500 ml | 4861 | 6 | 105 |
| Plum Ögondusch 1000 ml | 4707 | 6 | 64 |
| Plum Hållare ögondusch | 956430 | 1 | - |