


Sharpsafe Snabbguide 0,6L

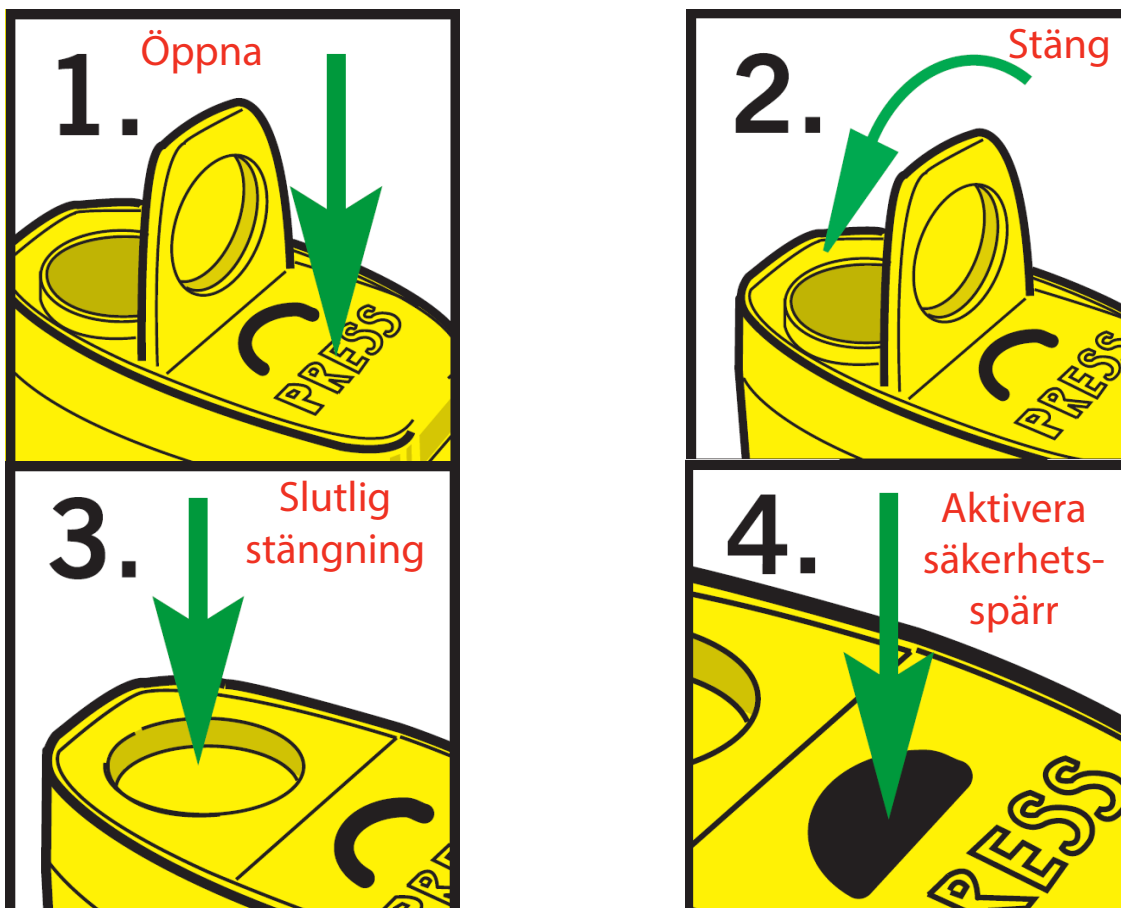

- 1 Öppna behållaren genom att trycka ner PRESS (Fig 1)
- 2 Stäng behållaren genom att fälla ner locket (Fig 2)
- 3 För slutlig stängning tryck ner locket till bottenläge. (Fig 3)
- 4 För att aktivera säkerhetsspärr tryck ner PRESS i bottenläge. (Fig 4)



Skötsel

Klarar avtorkning med rengöring/
desinfektionsmedel, avsedda för
daglig rengöring/desinfektion t.ex
div alkoholer som brukas inom
svensk sjukvård.

För mer information:
Wellspect HealthCare
Box 14, 431 21 Mölndal.
Kundservice. 031-376 40 20.
Fax. 031-376 30 17.

www.wellspect.se